

МТА Филлапекс/МТА Fillapex

МТА Филлапекс/МТА Fillapex - эндодонтический силер на основе МТА (минерал триоксид агрегат)

Состав обеспечивает следующие свойства:

- Предназначен для постоянного пломбирования корневых каналов;
- Высокая рентгеноконтрастность;
- Низкое расширение при затвердевании;
- Низкая растворимость при контакте с тканевыми жидкостями
- Оптимальная текучесть для заполнения;
- Не окрашивает зубы;
- Материал не содержит эвгенол, не влияет на отверждение композитных цементов.

Предупреждение: Федеральный закон вводит ограничение на продажу продукта, только для профессионального использования в стоматологии.

СОСТАВ

Салициловая смола, разжижающий компонент, натуральная смола, триоксид висмута, наночастицы кварца, МТА.

НАЗНАЧЕНИЕ

МТА Филлапекс/МТА Fillapex является эндоканальным силером, предназначенным для постоянной obturации корневых каналов, в сочетании с гуттаперчей или с серебряными штифтами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказан для пациентов с повышенной чувствительностью к композитным смолам или другим компонентам продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- МТА Филлапекс/МТА Fillapex содержит композитные смолы, которые могут активировать повышенную чувствительность у некоторых пациентов. Не используйте этот материал для пациентов, имеющих аллергию к композитным смолам или другим компонентам продукта.
- Остерегайтесь контакта с кожей и глазами. При попадании продукта на кожу или в глаза немедленно промойте водой.
- Остерегайтесь контакта со слизистой оболочкой ротовой полости. При попадании материала на слизистую оболочку промойте водой и предотвратите проглатывание продукта. В случае проявления аллергических реакций немедленно обратитесь к врачу.
- При загрязнении шприца слюной или кровью во время применения, необходимо утилизировать его и не использовать для других пациентов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время использования этого продукта, рекомендуется использовать защитную одежду, средства защиты глаз и перчатки пациенту и лечащему персоналу.

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

1. Набор МТА Филлапекс/МТА Fillapex в тубах в составе:
 - Паста Основа (Base Paste) – 1 туба 7,2г;
 - Паста Катализатор (Catalyst Paste) – 1 туба 4,8г;
 - Блокнот для замешивания - 1 шт.
2. Набор МТА Филлапекс/МТА Fillapex в тубах в составе:
 - Паста Основа (Base Paste) – 1 туба 18г;
 - Паста Катализатор (Catalyst Paste) – 1 туба 12г;
 - Блокнот для замешивания - 1 шт.

3. Материал стоматологический МТА Филлапекс/МТА Fillarex в отдельных упаковках в составе:
 - МТА Филлапекс/МТА Fillarex в смесительном шприце – 1шприц 4г;
 - Наконечники смесительные (Self mixing Tips) - 15 шт.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. **Подготовка корневого канала:** Перед внесением материала МТА Филлапекс/МТА Fillarex, корневой канал должен быть подготовлен и очищен в соответствии с выбранной эндодонтической техникой. Для применения продукта требуется создать изолированное сухое поле; поскольку, влажность в канале или относительная влажность способствует затвердеванию МТА Филлапекс/МТА Fillarex.
2. **Замешивание:**
 - Двойной шприц: двойной шприц обеспечивает равное смешивание в соотношении 1:1. Надавите на поршень для выдавливания материала непосредственно на стеклянную пластину, блокнот для замешивания или в корневой канал зуба. Цемент должен быть использован сразу же после смешивания.
 - Тубы: Смешать в равных объемах (1: 1) Смешивать в течение 30 секунд до образования однородной консистенции.
3. **Введение:** Используйте МТА Филлапекс/МТА Fillarex с гуттаперчей или серебряными штифтами, покрывая их тонким слоем цемента и заполняя корневой канал, в соответствии с выбранной техникой. МТА Филлапекс/МТА Fillarex может быть нанесен в корневой канал каналонаполнителем Лентуло (Lentulo) по спирали или, непосредственно, аппликатором наконечника, адаптированным к смесительному наконечнику.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом МТА Филлапекс/МТА Fillarex достаточно соблюдать обычные меры предосторожности при работе с химическими препаратами. Рекомендуется во время работы с материалом использовать защитные очки и подходящую одежду и перчатки, как для пациентов, так и для лечащего персонала. Материал безопасен для окружающей среды.

МАРКИРОВКА

Материал МТА Филлапекс/МТА Fillarex маркируется в соответствии со стандартом EN 980:2008 (Символы, применяемые для маркировки медицинских изделий).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Температурный режим хранения и транспортировки – не выше 28°C. Хранить в прохладном и сухом месте, подальше от источников влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не храните материал в холодильнике. Держите шприц плотно закрытым.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация упаковок и остатков неиспользованного материала должна проводиться в соответствии с действующими правилами и нормами местного законодательства, как отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам.

ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей Технической Документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности изделия МТА Филлапекс/МТА Fillarex – 2 года от даты производства.

ВНИМАНИЕ: Этот продукт должен быть использован в соответствии с описаниями приведенными в настоящей инструкции. Производитель не несет ответственность за не способность или повреждения, вызванные не правильным обращением или использованием.

Технический контакт:
Sônia M. Alcântara - CRO-PR 4536



EC REP EMERGO EUROPE
Molenstraat 15 - 2513 BH, The Hague
The Netherlands



Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A
CNPJ 00.257.992/0001-37 - I.E. 60128439-15
Rua Waldir Landgraf, 101 - Bairro Lindóia
CEP 86031-218 - Londrina - PR - Brazil

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС:
+55 (43) 2101-3200
sac@angelus.ind.br | www.angelus.ind.br



Дистрибьютор в России: ООО «Медента»
Россия, 123308, Москва, Новохорошевский проезд, д. 25.
Контактная информация для жалоб и предложений:
Тел. горячей линии +7-499-946-4609.
shop@medenta.ru | www.medenta.ru

Символы



Сопроводительные документы.



Хранить сухим.



Хранить в защищенном от солнца месте.



Продукция одноразового использования.